



SPECIFIKACIJA OPREME:

Oprema za sobu:

- TTN30-RW - interfonski telefon sa tri tastera
 - integrisan modul za privatnost razgovora
 - mogućnost handsfree komunikacije bez podizanja slušalice
 - taster za SOS poziv
 - taster za običan poziv
- =broj kreveta

BMN2-EB -interfejs ka SOS tasteru

Centralno komunikaciono mesto:

Računar sa softverom tipa PC-Zentrale i interfejsom PC1-I 1 kom

Napajanje sistema:

BVS20-SG - uređaj za napajanje 1 kom

NVG1011(NVG03) - uređaj za dodatno napajanje 1 kom



BOLNIČKI SISTEM POZIVANJA ZA NEPOKRETNE KORISNIKE

Alles an
einem
:BUS

www.interfoni.biz

OPIS SISTEMA:

PACIJENT POZIVA SESTRU SA INTERFONSKOG APARATA

(ako je ipak u mogućnosti da to uradi)

Po pritisku na jedan od tastera na telefonu TTN30 kod dežurne sestre zvoni telefon, a na računaru se ispisuje broj sobe iz koje dolazi poziv. Podizanjem slušalice sestra uspostavlja vezu sa pacijentom.

Ako sestra nije tokom upućenog poziva bila na svom radnom mestu, moguće je dodavanjem interfejsa ka telefonskoj centrali preusmeriti poziv na mobilni telefon.

Po dolasku na svoje radno mesto sestra može da vidu listu svih propuštenih poziva i da obavi pozivanja pacijenata koji su uputili poziv.

PACIJENT POZIVA SESTRU SA TASTERA PORED KREVETA

Po pritisku na taster pored kreveta upućuje se poziv dežurnoj sestri. Ona podizanjem slušalice uspostavlja vezu sa govornim aparatom pored kreveta pacijenta i uspostavlja komunikaciju bez potrebe da pacijent podigne slušalicu svog interfonskog aparata.

Ako sestra nije tokom upućenog poziva bila na svom radnom mestu, moguće je dodavanjem interfejsa ka telefonskoj centrali informaciju o upućenom pozivu na poslati mobilni telefon.

Po dolasku na svoje radno mesto sestra može da vidi listu svih propuštenih poziva i da obavi pozivanja pacijenata koji su uputili poziv.